



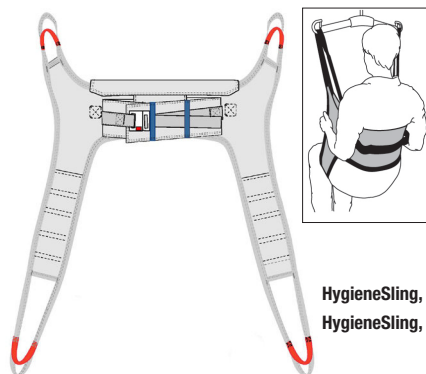

HygieneSling, con cinturón
HygieneSling, sin cinturón

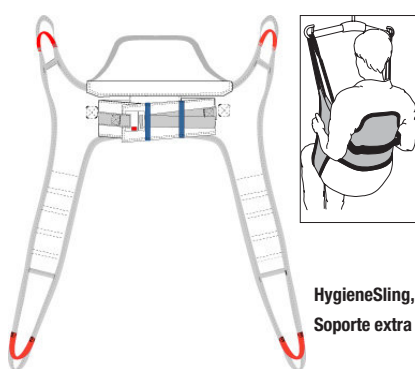

HygieneSling,
Soporte extra

Peso Máximo: 300kg/660lbs

HygieneSling es sencillo de colocar y facilita vestir y desvestir al usuario para ir al inodoro. Cuenta con soporte de piernas divididos, lo que hace que el usuario no se siente sobre el arnés. El peso se soporta en la parte lumbar y en las piernas. HygieneSling está diseñado para la mayoría de necesidades de elevación que incluyen el vestir y desvestir al usuario, incluso el cambio de pañales.

SystemRoMedic incluye una amplia variedad de arneses funcionales, cómodos y de alta calidad que pueden adaptarse a distintas elevaciones y necesidades. Los arneses están disponibles en distintos materiales y tallas desde la XXS a la XXL. Todos modelos son seguros y fáciles de usar y están diseñados para levantar usuarios de hasta 300Kg. La elección del modelo y el material depende de las necesidades del paciente y el tipo de transferencia a realizar.



Inspección Funcional

Inspección Visual y Mecánica

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.



Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.

Mantenga el manual en un lugar accesible.

No deje al paciente solo durante una transferencia.

Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.

El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de mayor peso máximo.

Compruebe siempre los pesos máximos de los dispositivos.

Contacte a su distribuidor en caso de dudas.

COLOCACIÓN DEL ARNÉS CUANDO EL PACIENTE ESTÁ SENTADO EN UNA SILLA DE RUEDAS/ SILLA O EN LA CAMA

El paciente debe tener un grado de control funcional para utilizar este arnés pues si tiene poco tono muscular podría existir riesgo de deslizamiento y caída, tome precauciones.

1. El arnés higiénico se coloca detrás de la espalda y unos 5 o 10 cm por debajo de las axilas. La etiqueta del producto está en la parte central del arnés y debería alinearse con la espina dorsal del paciente.

2. Asegúrese de que las cintas de la parte trasera son de la misma longitud una vez extendidas por debajo de los brazos. Será más fácil si el paciente se inclina o le ayudan a inclinarse ligeramente hacia delante.

Coloque los soportes de las piernas por debajo de los muslos del paciente.

3. Cierre la hebilla – un clic le indicará que está completamente cerrado. Tire de la cinta para abrochar el cinturón.

4. Cruce los soportes de las piernas y enganche las cintas de la espalda antes de las de las piernas. Comience con la elevación una vez que estén tensadas las cintas, antes de proceder con la elevación compruebe que todo funciona correctamente.

RETIRADA DEL ARNÉS CUANDO EL PACIENTE ESTÁ SENTADO




1. Tire de la ropa interior todo lo que pueda hacia la entrepierna. Coloque el soporte de las piernas entre las rodillas y la pretina.

2. Eleve al paciente y súbale la ropa interior. Asegúrese de que los brazos están fuera. No lo eleve más de lo necesario.

DESPUÉS DE IR AL BAÑO

1. Tire de la ropa interior todo lo que pueda hacia la entrepierna. Coloque el soporte de las piernas entre las rodillas y la pretina.

2. Eleve al paciente y súbale la ropa interior. Asegúrese de que los brazos están fuera. No lo eleve más de lo necesario.

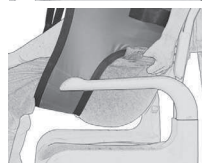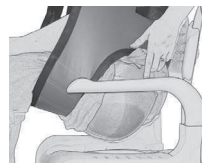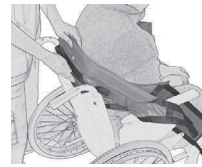

Material:

Poliéster: material duradero de baja fricción. Lavable a altas temperaturas.

Cuidados del Producto

Lea la etiqueta del producto



No usar suavizantes

Evite usar secadora.

Información de tallas

Los areneses se pueden utilizar con perchas de 2 y de 4 puntos. Asegurese que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés.

Utilice arneses específicos para la necesidad del usuario y así incrementar la seguridad e higiene.

Talla		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado	XXL/Blanco
Peso	lbs	22-66	55-99	88-132	121-187	165-220,5	198,5-286,5	264,5-375
	kg	10-30	25-45	40-60	55-85	75-100	90-130	120-170
Altura arnés	inch	19,5	25,5	29,5	34	36,5	37,5	37,5
	cm	50	65	75	87	93	95	95
Medida	inch	10	14	19	21,5	23,5	31,5	35,5
Asiento	cm	25	35	48	55	60	80	90